

# ТЕСТЫ НА НАРКОТИКИ

Инструменты скрининга на употребление наркотиков Dräger широко применяются полицейскими службами, мед. учреждениями, промышленными предприятиями и автопарками многих стран. Строгий контроль качества оборудования, производимого на заводе в Германии, обеспечивает точный и надежный результат измерений.

## Методика тестирования на наркотическое опьянение по слюне

Тестирование на наркотики по слюне обеспечивает высокую степень корреляции с результатами анализа сыворотки крови.

Быстрый, простой и гигиеничный отбор проб		
		pH


- неинвазивный;
- не требует специального помещения;
- контролируемый процесс отбора проб (контроль может осуществляться лицом любого пола).

Высокая точность результатов	

- Высокая степень корреляции с рутинными лабораторными методами (анализ сыворотки крови):
  - ~95-97% в случае анализа слюны на содержание кокаина и опиатов,
  - ~93% – на содержание амфетаминов,
  - 91% каннабиоидов (THC)\*;
- минимизация ложных положительных результатов.

Быстрый результат		

- экспресс-анализ на месте, с выводом результата на дисплей и на принтер.
- 0,28 мл слюны будет достаточно, чтобы выявить наличие наркотических веществ.

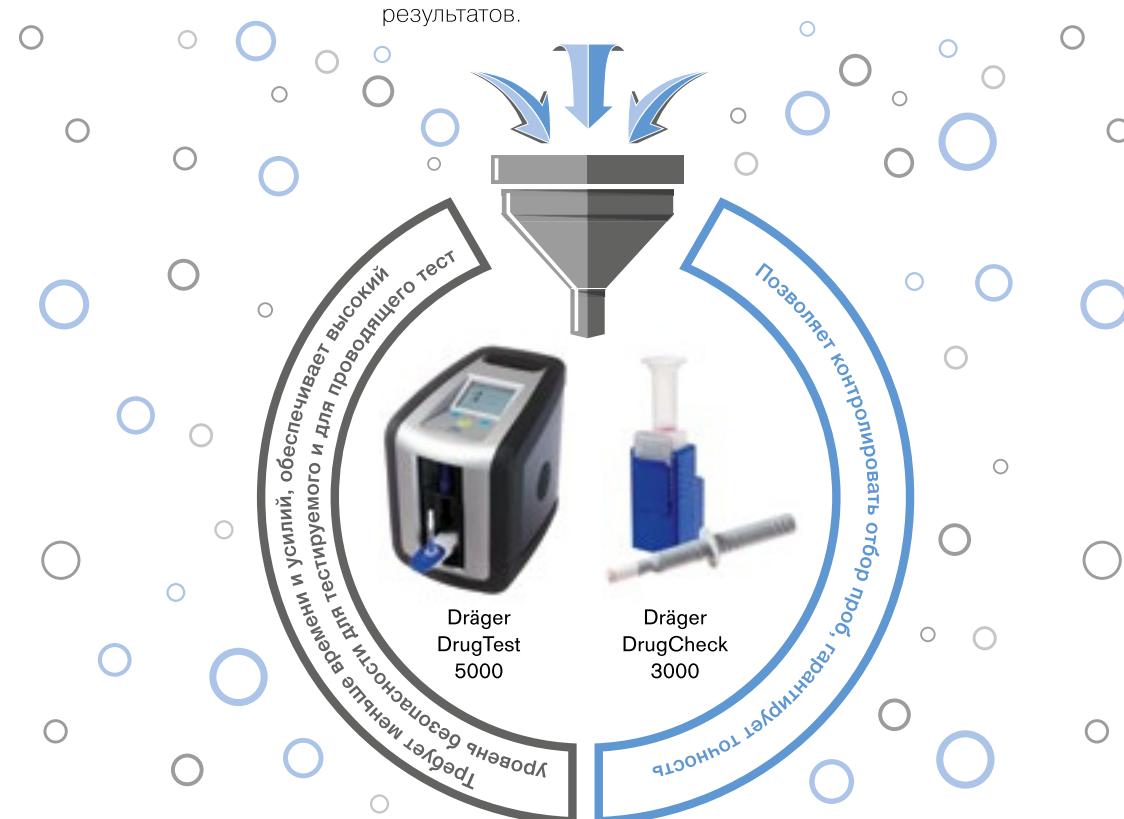

\* по данным исследований Центра правовой медицины Института судебной токсикологии, г. Франкфурт-на-Майне, и Института судебной медицины Саарландского Университета, Германия

# Система тестирования на наркотики Dräger DrugTest 5000

Обнаруживает в слюне от 2 до 8 групп наркотических веществ:

- ✓ Амфетамин (D-Амфетамин)
- ✓ Бензодиазепин (Диазепам)
- ✓ Кокаин
- ✓ Метамфетамины (D-метамфетамин)
- ✓ Метадон
- ✓ Кетамин
- ✓ Опиаты (Морфин)
- ✓ Тетрагидроканнабинол (Δ9-THC)

Обладает высокой степенью корреляции с результатами анализа образцов крови:


~95-97% в случае анализа слюны на содержание кокаинов и опиатов, ~93% – на содержание амфетаминов, 91% каннабиноидов (THC), по данным исследований Центра правовой медицины Института судебной токсикологии, г. Франкфурт-на-Майне, и Института судебной медицины Саарландского Университета, Германия

D-2372-2014




- Быстрый и простой отбор образца слюны
- Моментально готов к работе
- Анализирует пробу на месте
- Выводит однозначный результат на дисплей и на мобильный принтер
- Встроенная память анализатора позволяет сохранить до 500 результатов анализа, включая дату и время
- Меню прибора русифицировано
- Работает от сети 220В или от автомобильной сети
- Легкий и компактный – 4,5 кг
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2009/05877


ST-319-2008

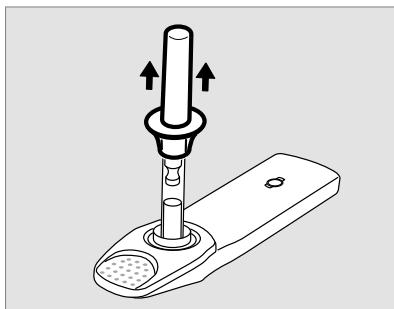

D-4780-2011

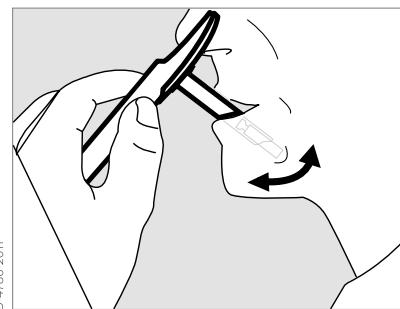

D-4779-2011

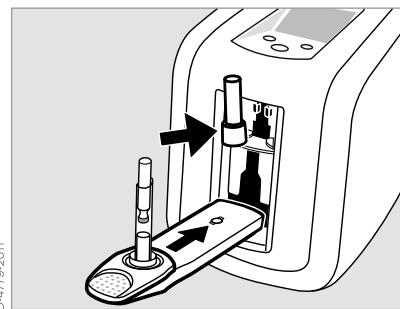

- Снимите защитную крышку.
- Передайте тест-кассету проверяемому.

- Проверяемый перемещает коллектор во рту из стороны в сторону до тех пор, пока индикатор не станет синим.

- Вставьте тест-кассету с картриджем пробоподготовки в анализатор.
- Закройте дверцу. Анализ начнется автоматически.
- Через несколько минут на экране появится результат.

# Тест-кассеты Dräger DrugTest 5000 Test-Kit

Расходные материалы для отбора био-образцов для тестирования на присутствие в слюне от 2 до 8 групп веществ.

Защитная крышка

Картридж  
пробоподготовки

Регистрационное удостоверение  
Росздравнадзора № ФС3 2009/05878

Аксессуары для  
документирования  
результатов тестирования

Портативный принтер  
Dräger Mobile Printer



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Анализатор Dräger DrugTest 5000	1	83 19 900
Тест-кассета Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 шт	83 19 830
Тест-кассета Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MTD*	20 шт	83 20 930
Тест-кассета Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 шт	83 21 280
Тест-кассета Dräger DrugTest 5000 COC-OPI*	20 шт	83 19 990
Тест-кассета Dräger DrugTest 5000 COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 шт	83 22 388
Dräger SSK 5000 (для сбора образцов с поверхностей)	20 шт	83 20 490
Компактная клавиатура, английская раскладка(«QWERTY»)	1	83 15 497
Сканер штрих-кода	1	AG 02 491
Принтер Dräger Mobile	1	83 19 310
Сумка для переноски анализатора DrugTest 5000	1	83 19 960
Кейс для переноски анализатора DrugTest 5000 и аксессуаров	1	83 22 675
Ящик для транспортировки анализатора DrugTest 5000	1	83 19 925
Кабель 12 В для зарядки от автомобильного прикуривателя	1	83 12 166
Пробоотборник для лабораторных анализов DCD-5000	1	83 19 910

\*COC: cocaine - \*OPI: opiates - \*BENZO: benzodiazepines - \*THC: cannabis - \*AMP: amphetamine - \*MAMP: methamphetamines - \*MTD: methadone

# Экспресс-тест на наркотики Dräger DrugCheck 3000

Тестер Dräger DrugCheck 3000 состоит из двух компонентов: устройства отбора образцов с помощью абсорбента для забора жидкости ротовой полости и тест-кассеты для проведения анализа.

Обнаруживает в слюне 5 или 6 групп наркотических веществ:

-  амфетамин (D-амфетамин)
-  бензодиазепины (диазепам)
-  кокаин

-  метамфетамины (D-метиламфетамин)
-  опиаты (морфин)
-  тетрагидроканнабинол ( $\Delta^9$ -тетрагидроканнабинол)

-  Быстрый и простой отбор образца слюны.
-  Анализ пробы на месте за 3-5 минут.
-  Высокая точность результатов.

 Простота и малое время подготовки к работе делает прибор универсальным инструментом для проведения проверок на дорогах и на рабочих местах с повышенными требованиями к безопасности. Тест-комплект не содержит электрических компонентов и может быть использован в опасных зонах.

Тест-кассета  
с индикаторным кольцом  
для контроля процесса

Предохранитель  
для защиты от случайного  
запуска теста



Воронка  
для устройства отбора образцов

Окошко с тест-полосками  
для идентификации веществ

Устройство отбора образцов  
цветовой индикатор  
обесцвечивается,  
как только впитано достаточное  
количество слюны

Эксплуатация: относительная влажность от 5 до 95%.



Средства

индивидуальной

защиты

